

MILYEN HAMAR LÁTHATOM A KEZELÉSEK EREDMÉNYÉT?
Legtöbb esetben már rögtön az első használat után, azonnal látható a kezelés eredménye. Nem szokatlan, hogy akár árnyalatokkal fehérebbek lesznek fogai már az első néhány kezelés hatására. Azonban ez mindenkinél más. A sárgás elszíneződések igen hamar és látványosan reagálnak a halványkékes/szürkés elszíneződésekhez képest. Erőteljesebben elszíneződött fogak esetén több kezelésre is szükség lehet, hogy látható eredményt érjen el.

MILYEN GYAKRAN VÉGEZHETEM EL EZT A KEZELÉST?
Kezdetben a kezelést biztonságosan végezheti heti vagy akár napi szinten az első hónap során. Miután elérte célját fenntartó kezelések végzését tanácsoljuk.

MILYEN GYAKRAN ALKALMAZZAK FENNTARTÓ KEZELÉSEKET?

Ez kor és étrend függő. Ha továbbra is ugyanazokat az ételeket és italokat fogyasztja, melyek fogai elszíneződését okozták, akkor azok idővel újból elszíneződnek majd. Általában havonta egy fenntartó kezelést ajánlunk, feltéve, hogy fogait ez után az útmutatóban, vagy fogorvosa által adott utasításoknak megfelelően ápolja.

ALKALMAZHATOM A PROFESSZIONÁLIS FOGFEHÉRÍTŐT KORONÁN, HÍDON IS?


A Professzionális fogfehérítő készlet csak a természetes fogakat fehériti, de használata biztonságos fogpótlás esetén is. A fogfehérítő nem fogja kifehériteni a fogpótlásokat beleértve hidat, koronát, kerámia héjat, műfogsort, töméseket. Ki kell cseréltetnie az összes fogpótlását amennyiben szeretné, hogy megegyezzenek a kifehéritett természetes fogaival.

HOGY TÁROLIAM A FEHÉRÍTŐ GÉLT?

Száraz, hűvös helyen tárolja, ahol napfény nem éri, illetve ahol gyerekek nem érhetik el.

MI OKOZZA A FOGAK SÁRGULÁSÁT?

Bár árnyalatban eltérőek lehetnek, kifejlődésük kezdetén minden fog fehér külső fogzománcsal nő ki. A mindennapok során elfogyasztott ételek és italok, mint a tea, kávé, vörösbort, vagy az erős színezékeket tartalmazó ételek hatására azonban, fokozatosan elszínezik ezt a fehér felszínt. A szemcsés fogkrémek és kemény sörtéjű fogkefék (a korrallal együtt) szintén hozzájárulnak a fogfelszín - fogzománc - kopásához, melynek hatására láthatóvá válik a zománc alatt lévő sárga dentin réteg.

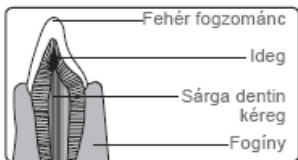

- Higiéniai okokból minden egyes szájba helyezhető sablon egy személy által használandó.
- NE szerelje szét a kék fény lámpát, a készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Meghibásodás esetén, a készülék javítását a balesetek elkerülése érdekében kizárólag a Rio vagy a Rio valamely szerviz képviselője végezheti el.
- Ne merítse a készüléket és a kékfény lámpát vízbe. Elegendő egy nedves ruhával áttörölni a készüléket. A szájba helyezhető sablonokat, a kék fény lámpáról történő levétel után, meleg vízzel tisztítsa.
- A kék fény lámpát kizárólag rendeltetésének megfelelően használja.
- NE szerelje szét vagy javítsa. Amennyiben bármilyen probléma merülne a fel a készülék használatával, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazó ügyfélszolgálatával.
- NE nyissa fel a készüléket.
- Csak a tartozék hálózati kábellel használja a készüléket.

ÖVINTÉZKEDÉSEK

- Kérjük, alaposan olvassa végig a használati útmutatót és őrizze meg, hogy későbbiek során is áttekinthesse.
- Az eszköz 8 éves kortól, valamint a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve gyakorlatlan vagy tájékozatlan felhasználók számára csak felügyelet, illetve a biztonságos alkalmazással kapcsolatos tájékoztatás mellett, a veszélyek ismeretében használható. Nem gyerekjáték. Tisztítását és karbantartását gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
- NE nyelje le.
- NE használja fogszabályozás során.
- Terhesség esetén ne használja a készüléket.
- Kerülje a fogfehérítő gél közvetlen szembe jutását. Ha a gél szembe kerül, bő vízzel öblítse ki.
- NE használja napi egy alkalomnál többször.
- Egy kezelés során ne használja 20 percnél hosszabb ideig.
- Amennyiben a használat során bármely kellemetlen érzést tapasztal, szakítsa félbe a használatot és alaposan öblítse ki száját vízzel.
- Fogínysvoradás vagy bármilyen ínybetegség, szájüregi fertőzés esetén a kezelés alkalmazása előtt, kérje fogorvosa véleményét Nem ajánljuk a használatát fogínygyulladás, szájfekély vagy egyéb szájon belül található sérülés esetén.
- A termék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességű, illetve a kezelés menetét nem ismerő személyek által történő felhasználásra. Ilyen esetben szükséges az adott személy(ek) felügyelete, valamint tájékoztatása a termék használatával kapcsolatban, a biztonságukért felelős személy részéről.



Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak kezeléséről (2002/96/EC) (Waste of Electrical and Electronic Equipment - WEEE Directive) célja, hogy a hulladékká vált

elektronikai termékek újrahasznosítása a legjobb rendelkezésre álló újrafeldolgozási és újrahasznosítási technológiák alkalmazásával történjen, a környezeti hatások minimálisra csökkentése, az esetleges veszélyes összetevők kezelése és a hulladéklerakók rohamos növekedésének elkerülése érdekében. A termék besorolás szerint Elektromos és elektronikai készüléknek számít, ezért kérjük, hogy a termék élettartamának lejártakor, azt a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. TILOS a terméket háztartási hulladékként kezelni.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A készülék normál használata esetén 2 év cseregaranciát biztosítunk. Kérjük, őrizze meg a számlát, mert a garancia csak a számla bemutatásával érvényesíthető!

Ha kérdése van, vagy nehézségeket tapasztal, kérjük, hívja a MOPA Kft. ügyfélszolgálatát: 9082 Nyúl, Széchenyi út 31. Telefon: +36 30 6 560 292 Munkanapokon: 9.00-16- óráig



A Professional Teeth Whitening fogfehérítéssel gyorsan fehéreítheti ki fogait már otthona kényelmében is. Használata gyors, biztonságos és egyszerű. A speciális összetételű fehérítő gél és a kék fény gyorsan hatnak, eltávolítva a fogak tea, kávé, vörösbort vagy cigaretta okozta, valamint a kor miatt kialakuló természetes elszíneződését. A kezelés után fontos a fogak megfelelő ápolása és a rendszeres fogászati ellenőrzés. A termék nem helyettesíti a rendszeres fogászati ellenőrzést.



Rio, Dezac és Professional Teeth Whitening
a The Dezac Group Ltd bejegyzett védjegyei
© The Decac Group Ltd 2012

A készülék hivatalos forgalmazója a MOPA Kft. 9082 Nyúl, Széchenyi út 31. E-mail: info@mopa.co.hu

FONTOS


A termék megfelel az EU kozmetikai biztonsági követelményeinek.

PROFESSZIONÁLIS FOGFEHÉRÍTŐ

MIELŐTT HOZZÁFOGNA

PROFESSZIONÁLIS FOGFEHÉRÍTŐ

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

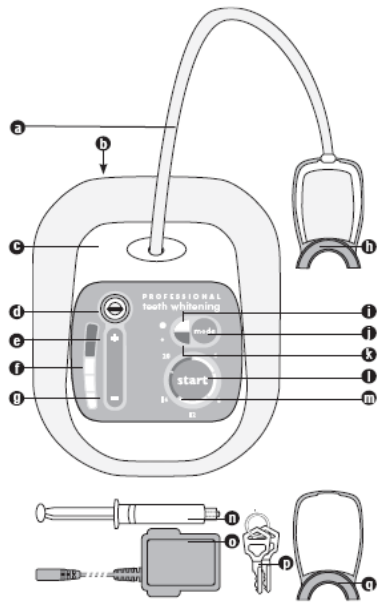


SABLON FORMÁLÁSA

14 év alatti gyermekek számára nem ajánlott. A sablont ne érje magas hőmérséklet, például ne helyezze a mosogatógépbe és ne tegye ki közvetlen napfénynek.

FONTOS: A következő lépéseket soha ne végezze el, miközben a sablon a kék fény lámpában található.




Engedjen 4 cm forró vizet a csapból (NE használjon forrásban lévő vizet) egy megfelelő edénybe és tegye bele a sablont végét körülbelül 60 másodpercre.

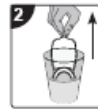

Óvatosan vegye ki a sablont, ügyelve arra, hogy ne tegyen kárt benne, amíg hajlítható állapotban van. Óvatosan rázza le a felesleges vizet.



Harapjon a csatornába, a sablont melegnek fogja érezni a fogínyén – ez normális. Tartsa így 30 másodpercig.

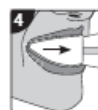


Távolítsa el a sablont és helyezze hideg vízbe 60 másodpercre, hogy lehűljön. Amennyiben szükséges, ismételje meg az 1-4. lépést, hogy a sablon még kényelmesebben illeszkedjen.


A sablon készen áll a használatra.

ELŐKÉSZÜLETEK

Használat előtt mossa meg fogát és használjon szájuhanyt, hogy eltávolítsa minden ételmaradékot. Amennyiben erős lerakódás található fogain, ajánlott a Fogfehérítő használata előtt egy fogorvossal letisztíttatni a fogait.

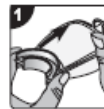

Mossa meg a sablont meleg vízzel, (a sablonok előzetesen sterilizálva lettek). Nyomja a sablont a kék fény lámpa tartójába. Illessze a helyére a lámpa oldalán és hátsó részén körbeháladó sávba.

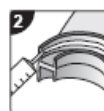

Távolítsa el a fedőt a fehérítő gél fecskendőjének végéről. Fecskendezzen egy vonalban gél a sablonra. Helyezze vissza a fecskendő fedelét.

Ajánlott, hogy fokozatosan építse fel a fogfehérítő kezeléseit. Kezdje a „teljes kezeléssel” 1-es erősségi szinten. Az egymást követő kezeléssel fokozza az erősségi szintet, amíg el nem éri a kívánt fehérséget illetve a maximális fokozatot. A fehérség megőrzéséhez alkalmazzon „fenntartó kezeléseket” amelyek csak 12 percig tartanak.



TELJES KEZELÉS PROGRAM

Kiválasztás után a felső kijelző zölden világít. Ez a program 20 percig tart.



FENNTARTÓ PROGRAM

Kiválasztás után az alsó kijelző zölden világít. Ez a program 12 percig tart.



START/SZÜNET GOMB

A start/szünet gomb lenyomásával kezdődik el a kiválasztott program. A program szüneteltetéséhez bármikor lenyomhatja a start/szünet gombot, majd nyomja meg újból a folytatáshoz.




VISSZASZÁMLÁLÓ

A program üzemidejét 4 perces szakaszokra osztja fel, ezek felvillannak, amint a start/szünet gombot lenyomta. A villogó szakasz jelzi a hátralévő időt. Amennyiben a kezelés szüneteltetve van, az aktuális szakasz nem fog villogni.



ERŐSSÉGI SZINT


5 erősségi szint van. Az első használat során, az első szinten használja. Fokozatosan építse fel a kezelést. A kezelés során állítható az erősségi szint.

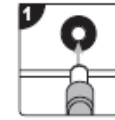


Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék hátoldalán található hálózati adapter csatlakozóba, majd csatlakoztassa a konnektorba.




Használja a biztonsági kulcsot a készülék feloldásához és bekapcsolásához.

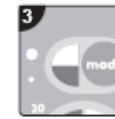

Nyomja meg a mód gombot a kívánt program kiválasztásához. A programjelző felvillan jelezve a kiválasztott programot.

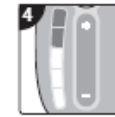


Használja a +/- gombokat az erősségi szint beállításához.

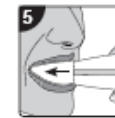

Helyezze a sablont a szájába, úgy hogy felfeküdjön a fogaira. Amint a helyére kerül lazítsa el ajkait a sablon fellett.



Nyomja meg a start/szünet gombot a kezelés elkezdéséhez. A visszaszámlálón található fények jelzik a hátralévő időt.

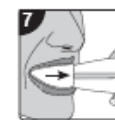

A kezelés befejezése után vegye le a sablont a kék fény lámpáról és mossa meg alaposan meleg vízzel. Levegőn hagyja megszáradni, mielőtt elrakná. Öblítse ki száját vízzel (ne nyelje le).



Amennyiben nem használja a készüléket, egyszerűen helyezze a szájba illeszthető sablont a készülék fölé. A hajlékony kar megtartja a kék fény lámpát.