

hee

ALLERGIÁS TÜNETEKET ENYHÍTŐ KÉSZÜLÉK

Felülvizsgálat dátuma: 2019-07-08
Verzió: A3

hee

ALLERGIÁS TÜNETEKET ENYHÍTŐ KÉSZÜLÉK

Fényterápia

- ✓ Allergia és szénanátha tüneteinek hatékony enyhítése
 - ✓ Gyógyszeres kezelés mellett is használható
 - ✓ Könnyű és hordozható
- A cserélhető orrszonda-burkolatnak köszönhetően több személy is használhatja.



Használati
utasítás

0120
CE

Modell sz.:MC-001

Tartalom

Bevezetés.....	2
A készülék részei.....	3
Figyelmeztetések.....	3
Az allergiás tüneteket enyhítő készülék használata	4
Elemmel kapcsolatos információk.....	5
Műszaki leírás.....	6
Hibaelhárítás.....	7
Karbantartás és figyelmeztetések.....	7
Tárolás.....	7
Hulladékkezelés.....	8
Garancia	8
Vásárlói visszajelzés.....	9
Az allergiás tüneteket enyhítő készülék szimbólumainak magyarázata.....	10

Bevezetés

Köszönjük, hogy a Hee allergiás tüneteket enyhítő készüléket választotta!

Használat előtt, kérjük, olvassa el figyelmesen és későbbi felhasználás céljából őrizze meg ezt a használati útmutatót.

A Hee allergiás tüneteket enyhítő készülék IIA osztályú orvostechnikai eszköz, klinikailag tesztelt termék. A készülék hatékonyan képes kezelni a különböző allergiás betegségeket, beleértve a szénanáthát (szezonális allergiás rhinitis), ezenkívül enyhíti a szénanátha tüneteit. Csökkenti a kültéri és beltéri allergének, például fűfélék pollenje, macskaszőr és házban előforduló por által okozott nazális allergiás tüneteket.

A Hee allergiás tüneteket enyhítő készülék két meghatározott hullámhosszúságú fényterápiát alkalmaz az allergiás rhinitis tüneteinek gyengéd enyhítésére. Az eszköz önmagában vagy a szokásos allergiás gyógyszerek szedése mellett is használható.

Vezetéknélküli kialakítású, könnyen hordozható és egyszerűen használható!



A készülék részei

beállító gomb

beállító gomb

be-
/kikap
csoló
gomb

orrszonda burkolat

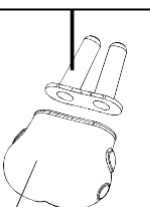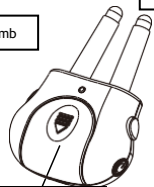

elemtartó
fedét

védőburkolat

Figyelmeztetések

- ✓ A terméket a betegek saját használatára tervezték.
- ✓ A betegek szakorvosi segítség nélkül saját maguk is használhatják a terméket.
- ✓ Kezelés folytatása közben a készüléken **SEMMILYEN KARBANTARTÁS** nem végezhető.
- ✓ A beteg a termék minden funkcióját használhatja és működtetheti.
- ✓ 16 év alatti gyermekek felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket.
- ✓ 6 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.
- ✓ Tartsa a készüléket gyermekektől elzárva. A készülék apró, lenyelhető darabokat tartalmaz. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvosához.
- ✓ Nem alkalmas szívritmus-szabályozóval vagy más beültetett orvostechikai eszközökkel rendelkező személyek számára.

- ✓ Nem alkalmas orrpolippal, érzékeny orrnyálkahártyával vagy rossz vérkeringéssel rendelkező személyek számára.
- ✓ Soha ne nézzen közvetlenül a kibocsátott fénysugárba, még optikai eszköz (például szemüveg) használata esetén sem.
- ✓ Kerülje az eszköz használatát gyúlékony vagy érzéstelenítő/altatógázok közelében.
- ✓ Azonnal hagyja abba az eszköz használatát, ha a kezelés során bármikor kellemetlenséget vagy fájdalmat érez. Ha a kellemetlenség továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
- ✓ Mindig a gyártó által megadott kiegészítőket használja


Az allergiás tüneteket enyhítő készülék használata
Használat előtt nedves, nem foszló textillel alaposan törölje le az orrszonda burkolatát.

Az elemek behelyezése és cseréje

Az elem behelyezése vagy cseréje során használjon megfelelő szerszámot (például "vékony fémlapot") az eszköz hátulján kiálló kis kerek lyuk lenyomására, és távolítsa el az elemtartó fedelét. Ezután a megfelelő polaritás figyelembevételével helyezze be / cserélje ki a 2 elemet (2 × CR2032 lítium elem). Végül zárja le biztonságosan az elemtartó fedelét.

Kezelés megkezdése

Helyezze az orrszonda burkolatát a készülékre. Ez megvédi a készüléket minden olyan folyadéktól, amely károsíthatja azt. Nyomja meg és tartsa 1 másodpercig lenyomva a Be/Ki gombot, amíg a két hullámhossz aktiválódik, és a piros lámpák bekapcsolnak.

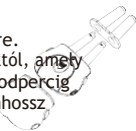

Megjegyzés: Ha az elemek lemerültek és cserére szorulnak, a piros lámpa villogni kezd, és az alacsony töltöttség-jelző megszólal.

A két állítható gomb megnyomásával helyezze be a két orrszondát az orrba, amennyire ez kényelmesen lehetséges. A kezelés 3 percig tart, és befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol.

Két egymást követő sípolás adja tudtul a kezelés befejezését. Távolítsa el a szondákat mindkét beállító gomb megnyomásával. Minden használat után alaposan tisztítsa meg az orrszondát. Az utasításokat lásd a Karbantartás és figyelmeztetések című részben. Ajánlott naponta kétszer használni, és 5-6 órát várni minden kezelés között.

Megjegyzés: A készülék bármikor kikapcsolható a be-/kikapcsoló gomb egy másodpercig való lenyomásával. Azonnal hagyja abba az eszköz használatát, ha a kezelés során bármikor kellemetlenséget vagy fájdalmat érez. Ha a kellemetlenség továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

Elemmel kapcsolatos információk

1. Az optimális teljesítmény érdekében 12 havonta cserélje ki az elemeket.
2. Távolítsa el az elemeket, ha az eszközt hosszú ideig nem használja.
3. Ne keverje a régi és új vagy a különféle típusú elemeket.

4. Figyelem: Ha az elemek szivárognak, és bőrre vagy szembe kerülnek, azonnal mossa le bő vízzel.

5. Az elemeket felnőtteknek kell kezelnie. Gyermekektől elzárva tartandó.

6. Ne használjon újratölthető elemeket. A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.

7. Vegye ki a lemerült elemeket a készülékből.

8. Az elemeket biztonságosan ártalmatlanítsa az elem gyártójának utasításai szerint.

Műszaki leírás

Model száma: MC-001
Termék neve: Allergiás tüneteket enyhítő készülék
Áramellátás: 2×CR2032 lítium elemek
Kezelési technológia: Kettős hullámhosszúságú fényterápia
Alkalmazott hullámhossz: Vörös fény 660 nm (+/- 5nm)(
nanométer)

Működtetés: Infravörös fény 940 nm (+/- 10nm)
Körülbelül 3 percig, naponta kétszer
Tárolási és szállítási -20 °C-55 °C (-4 °F-131 °F)/kevesebb

feltételek: mint 93% RH
Működési feltételek: 5 °C-40 °C (41 °F-104 °F)/30%-80% RH
Méretek: 60mm×44mm×21mm körülbelül
Termék súlya: 18g (elemek nélkül)

Elem élettartama: Körülbelül 30 használat (~3 perc/alkalom)
IP-védelem: IP22

A termék várható élettartama: 2 év, normál használat mellett.

MEGJEGYZÉS: A kivitel és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak

Hibaelhárítás

Probléma	Ellenőrzendő pontok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	Lemerültek az elemek?	Cserélje ki az elemeket.
	Megfelelően vannak az elemek behelyezve?	Helyezze be az elemeket a megfelelő polaritással.

Karbantartás és figyelmeztetések

- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne ejtse le vagy dobja nagy magasságból a készüléket. A készülék tisztításához ne használjon vegyszert.
- Amennyiben meg kell tisztítania, törölje le nedves, nem foszló textillel.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, illetve védje a szennyeződésektől és a nedvességtől.

Tárolás

- ✓ Használat után biztonságosan és gyermekektől elzárva tárolandó. Tárolja a készüléket hűvös, jól szellőző helyen.
- ✓ Soha ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre. Vegye ki az elemeket a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja. A szivárgó elemek károsíthatják a készüléket.

Hulladékkezelés

A használt, teljesen lemerült elemeket speciális címkével ellátott gyűjtőedénybe kell kidobni, mérgező hulladék gyűjtőhelyen vagy elektromos kiskereskedőn keresztül ártalmatlanítani. Az elemek megfelelő hulladékkezelésére vonatkozóan jogi kötelezettség áll fenn.

Megjegyzés: A káros anyagokat tartalmazó elemeken a következő jelöléseket találja:

- Pb= ólmot tartalmazó elem,
- Cd= kadmiumot tartalmazó elem,
- Hg= higanyt tartalmazó elem.



Kérjük, a 2012/19/EU (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló) irányelvnek megfelelően ártalmatlanítsa a készüléket. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságokhoz.

Garancia

A termékre a vásárlástól számított egy év garancia érvényes a mechanikai és elektronikai gyártási hibák ellen. A műszerben nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek.

Bármely illetéktelen személy által végzett javítási kísérlet érvénytelenné teszi a jótállást. Ez nem érinti az Ön törvényes jogait.

Vásárlói visszajelzés

Folyamatosan arra törekszünk, hogy termékeinkkel és ügyfélszolgálatunkkal ügyfeleink örömeire szolgáljunk, így nagyra értékeljük véleményét és visszajelzését az allergiás tüneteket enyhítő készülékről, mivel ez segíti fejlődést és folyamatos javulást. Örülnénk, ha megosztaná velünk gondolatait a termék kapcsán. Kérjük, látogasson el a www.hee-beauty.co.kr webhelyre, és keresse a kezdőlapon az ügyfélszolgálati részt.

 Netop Industrial Company Limited, Dapu Industrial Estate, Gangzi Village, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Tel: +86 (769) 83999008
Fax: +86 (769)83999238

Meghatalmazott képviselő (az Egyesült Királyságban & EU-ban 27):

WellKang Ltd, 16 Castle St, Dover, CT16 1PW, England, UK; Suite B, 29 Harley Street, LONDON W1G 9QR, England, UK és kemény brexit esetén, átmeneti időszak nélkül

The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland
Tel: +44 (20) 32876300; +353 (1) 44 33 560
Web site: www.CE-marking.com



Az allergiás tüneteket enyhítő készülék szimbólumainak magyarázata



Lásd a használati utasítást (A jel háttérszíne: kék; A jel grafikus szimbóluma: fehér)



Figyelem!



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az allergiás tüneteket enyhítő készülék BF típusú eszköz



Hulladékkezelés a 2012/19/EU irányelv szerint (WEEE)



A gyártó neve és címe



Vonalkód



Sorozatszám



Modell száma

IP22

Védettségi fok szimbóluma



Tartsa szárazon



Megfelel az európai orvostechnikai eszközökről szóló irányelvnek (93/42/EGK), a 2007/47/EK irányelv követelményei által módosítva. Bejelentett szervezet SGS UK

Mentességi csoport az EN 62471:2008 szerint

ER